

ROLLATOR-/ROLLSTUHLSCHIRM BESCO 99

 Plastiktüten können gefährlich sein!

Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Verpackungstüte von Säuglingen und Kleinkindern fern!

 Bitte diese Montage- und Bedienungsanleitung unbedingt vor Montage lesen und beachten!

Vielen Dank und unseren Glückwunsch für den Kauf dieses Rollatorschirms. Bevor Sie die Zubehörtüte öffnen, lesen Sie bitte die komplette Montage- und Bedienungsanleitung. Wichtig ist auch ein unbedingtes Beachten aller Sicherheitshinweise. Sind Sie genau nach der Montage- und Bedienungsanleitung vorgegangen, können Sie uneingeschränkt auf die beste Qualität und einfachste Handhabung dieses in unserem Hause entwickelten Originalproduktes vertrauen.

Alle Original-MPB-Rollatorschirme schützen Sie optimal vor Regen und Sonne, sie blockieren die schädliche UV-Strahlung nahezu völlig. Das patentierte Air-Vent-System sorgt für eine weitgehende Entlastung und zusätzliche Stabilität bei windigem Wetter. Mit unserem neuen Montage-Kloben Besco 99 können die MPB-Rollatorschirme an den Besco-Rollator oder -Rollstuhl sowohl senkrecht als auch waagrecht montiert werden. Durch den platzsparenden Anbau des kompakten Klobens entweder am Griffrohr oder Rahmenrohr des Rollators bzw. am Griffrohr oder Rohr oberhalb des Vorderrads vom Rollstuhl können Sie Ihr Besco-Produkt sicher mit beiden Händen nutzen, ohne dass Sie bei weiteren Zubehören eingeschränkt werden.

Rollatorschirme sind für s.g. Delta-Gehräder nicht geeignet!

In der Verkaufsverpackung finden Sie: Rollatorschirm mit zwei Verstellgelenken und Schirmhülle (Abb. 1), die vormontierte Halterung Besco 99 (Abb. 2), einen Zubehörbeutel mit Schellen, Schrauben und weiteren Befestigungsmaterialien (Abb. 3).


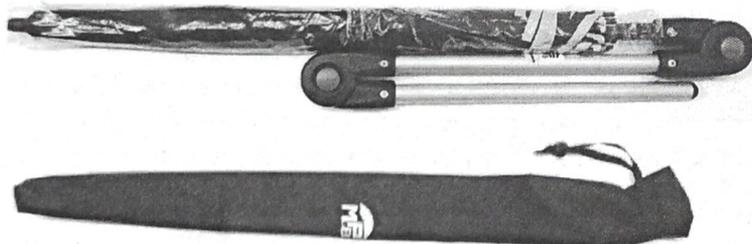


Abb. 1

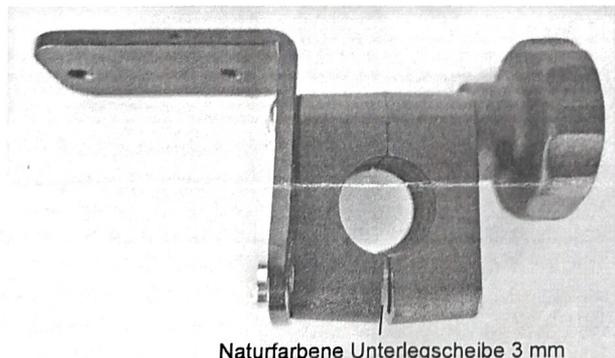

Naturfarbene Unterlegscheibe 3 mm

Abb. 2

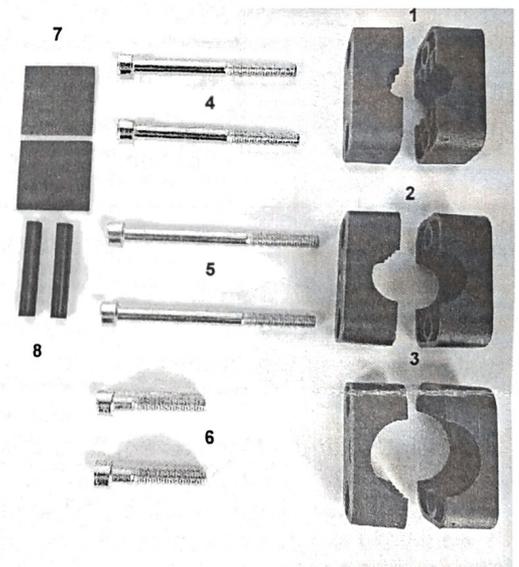


Abb. 3

Abb. 1: Schirm mit 2 Verstellgelenken und Schirmhülle

Abb. 2: Vormontierter Kloben mit Schelle zur Aufnahme des Schirmgestänges vorbereitet für Rollatoren mit 7°-Griffrohr (rechts) und Rollstühle

Abb. 3: Zubehörbeutel mit folgendem Inhalt:

1. Kunststoffschelle 12,7 mm für die Montage am Ausziehrrohr des Rollators
2. Kunststoffschelle 18 mm für die Montage am Rahmenrohr des Rollators
3. Kunststoffschelle 25 mm für die senkrechte oder waagerechte Montage am Rollstuhl
4. Innensechskantschrauben 65 mm für Montage am Ausziehrrohr des Rollators
5. Innensechskantschrauben 75 mm für Montage am Rahmenrohr des Rollators
6. Innensechskantschrauben 35 mm für die senkrechte oder waagerechte Montage am Rollstuhl
7. Gummischeiben 29x29 mm für die sicherere Montage am Rollator oder Rollstuhl
8. Gewindeabdeckung aus Kunststoff (38 mm), kürzbar, nur notwendig bei der Montage am Rollator zusätzlich ohne Abbildung: Einwagschlüssel SW5

Montage

Innensechskantschraube 40 mm

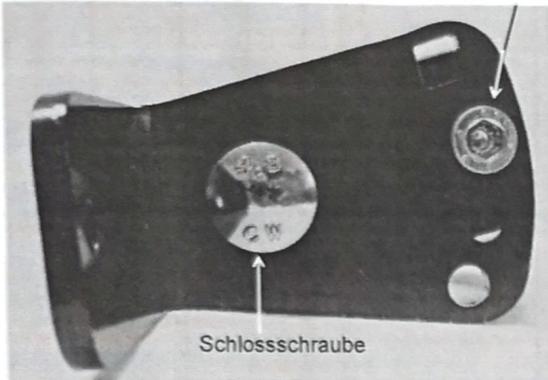


Abb. 4: Vormontierter Kloben, Ansicht der Schrauben

Der Befestigungskloben ist vormontiert mit einer Schlossschraube mit Vierkant im Befestigungsloch und einer Innensechskantschraube mit Flachkopf im Kulissenloch für die Montage am rechten Rohr des Rollators oder am Rohr oberhalb des Vorderrads des Rollstuhls. Beachten Sie beim Wechseln der Position der Innensechskantschraube für verschiedene Montagezwecke, dass Sie die naturfarbene Unterlegscheibe (Abb. 1) unbedingt wieder zwischen die Halbschellen legen.

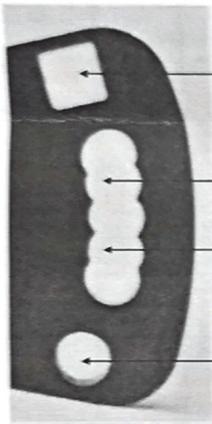


Abb. 5: Detailansicht der Kulisse für verschiedene Montagezwecke

- (1) Position der Schlossschraube bei waagerechter Montage am Rollstuhl
- (2) 7°-Position der Innensechskantschraube bei Montage rechts am Rollator oder am rechten Rohr der oberhalb des Vorderrads des Rollstuhls
- (3) Position der Innensechskantschraube bei Montage links am Rollator
- (4) Position der Innensechskantschraube bei waagerechter Montage

Der neue Kloben Besco 99 ermöglicht Ihnen die Montage Ihres Schirmes an verschiedenen Stellen Ihres Besco-Rollstuhls oder -Rollators. Bitte überlegen Sie zunächst, an welcher Stelle des Rollators bzw. Rollstuhls Sie die Halterung montieren wollen. Verwenden Sie den Schirm am rechten Rahmen- oder Ausziehrrohr des Rollators bzw. am Rohr oberhalb des Vorderrads des Rollstuhls, kann der Kloben im vormontierten Zustand belassen werden.

Für die Montage am linken Rahmen- oder Ausziehrrohr des Rollators müssen Sie die Innensechskantschraube auf die in **Abb. 5** gezeigte Position 3 versetzen.

Für die waagerechte Montage am Griffrohr des Rollstuhls, müssen Sie sowohl die Schlossschraube als auch die Innensechskantschraube versetzen (**Abb. 5, Position 1 und 4**)

Montieren Sie die Aufnahmeschelle mit dem Handrad für den Schirm immer an der Außenseite des Rollators oder Rollstuhls. Falls Sie die Innensechskantschraube am Grundkloben versetzt haben, denken Sie bitte daran, die naturfarbene Unterlegscheibe wieder zwischen die Halbschellen zu legen. Das erleichtert Ihnen das Einstecken des Schirmgestänges.

Wählen Sie für die Montage am Rohr des Rollstuhls bzw. Rollators die passenden Schellen und Schrauben aus. In der Beschreibung von Abb. 3 finden Sie diese unter den Punkten 1-6 aufgeführt. Ziehen Sie die Schrauben gut fest und ziehen Sie diese nach ca. 2 Tagen nach. Die bei der Montage am Rollator sichtbaren Schraubengewinde können Sie mit den schwarzen Kunststoffröhrchen abdecken. Schneiden Sie diese ggfs. mit einer Schere auf die passende Länge und schlitzten Sie sie mit einem scharfen Messer seitlich auf. Danach können Sie die Röhrchen über die Schraubengewinde ziehen und so diese abdecken. **Abb. 6, 7 und 8** zeigen Ihnen die fertigen Halterungen für verschiedene Anwendungen, wegen der Übersicht ohne Rohre.

Sie können nun den Haltearm mit Schirm in die Schirmhalterung einsetzen, indem Sie das Handrad etwas aufschrauben. Durch die lange Aufnahmestange ist eine Nutzung unserer Original-MPB-Schirme auch für Personen mit einer Größe über 200 cm möglich.

Entfernen Sie die Schutzhülle. Sie können diese ähnlich einer Schleife oberhalb des Verstellgelenks festbinden. Bringen Sie Ihren Schirm durch Drücken des grauen Arretierungs-Knopfes an den Verstellgelenken in die gewünschte Position. Durch Festziehen des Handrads können Sie Ihren Schirm einfach gegen Verdrehen sichern.

Öffnen Sie die Klettgurte des Schirms und drücken Sie den Öffnungsknopf des Schirmes. Der Schirm öffnet sehr schnell – bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise. Haben Sie Ihren Schirm benutzt, so rollen sie den zwischenzeitig getrockneten Schirm wieder ein und verfahren Sie ansonsten in umgekehrter Reihenfolge.

Übersicht der montierten Kompaktkloben

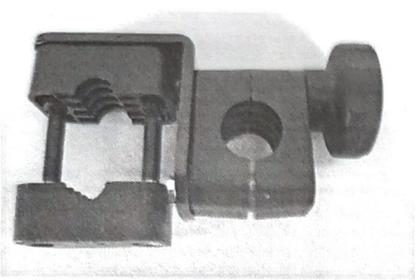


Abb.6:
Montage am Rohr des Rollators

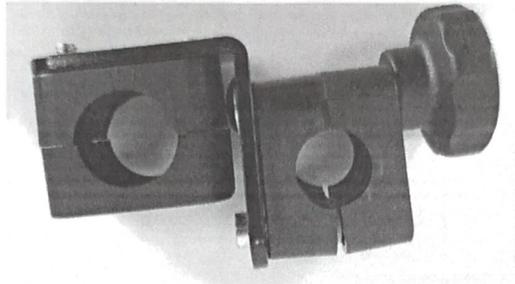


Abb.7:
Senkrechte Montage am Rollstuhl

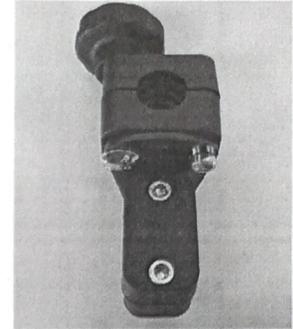


Abb.8:
Waagerechte Montage am Rollstuhl

Verwenden Sie bei Rundrohren stets die Gummilaschen (**Abb. 1**, Position 7) zwischen Schelle und Rohr, um ein Drehen der Schelle am Rohr zu vermeiden!

SICHERHEITSHINWEISE:

Der Schirm muss so angebracht werden, dass der Faltmechanismus des Rollators oder Rollstuhles und die Funktion wichtiger Teile wie zum Beispiel der Bremsen nicht eingeschränkt werden.

Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben regelmäßig auf festen Sitz zu kontrollieren.

Der Schirm öffnet sich sehr schnell automatisch auf Knopfdruck. Halten Sie ihn vom Körper entfernt und achten Sie auf andere Personen in der Nähe, um Verletzungen zu vermeiden.

Beim Öffnen und bei geöffnetem Schirm besteht Verletzungsgefahr anderer durch die äußeren Schirmspitzen an den Enden der Schirmbespannung. Beim Einklappen des Schirmes und des Halters in umgekehrter Reihenfolge besteht konstruktionsbedingt Klemmgefahr für die Finger in den Knickgelenken.

Mit einem Rollatorschirm nehmen Sie mehr Raum ein, auch dann, wenn der Schirm ausgeklappt, aber nicht geöffnet ist. Beachten Sie bei geöffnetem Schirm, dass Sie mit diesem seitlich rechts und links hängen bleiben können. Achten Sie auch auf die Gesamthöhe, damit Sie nicht z.B. mit ausgefahrenen Markisen kollidieren. Vor dem Einfahren in Gebäude ist der Schirm zu schließen und herunterzuklappen.

Jeder Schirm bietet dem Wind eine enorme Angriffsfläche. Benutzen Sie daher den aufgespannten Rollatorschirm bzw. Rollstuhlschirm auf keinen Fall bei Wind und Böen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie der aufgespannte Schirm beim Fahren mit dem Rollator bzw. Rollstuhl negativ beeinflusst, so klappen Sie den Schirm sofort wieder ein, um Unfälle zu vermeiden.

Klappen Sie den Schirm bei Nichtgebrauch ein. Sichern Sie die hochwertige, trockene Stoffbespannung des Schirmes durch Eindrehen und Schließen des Klettverschluss-Bandes und Nutzung der Schirmhülle.

Achten Sie bei der Benutzung stets auf ein gut einsehbares, freies Sichtfeld. Behindern Sie andere Fußgänger und Verkehrsteilnehmer nicht. Bevor Sie den Schirm zum ersten Mal bei Regen benutzen, üben Sie bitte das Öffnen und Schließen mehrfach in „Trockenübungen“. Rollen Sie nur vollständig getrocknete Schirme ein und ziehen dann die Schirmhülle über, da es ansonsten zu Stockflecken und/oder Verfärbungen der Bespannung kommen kann.

Vermeiden Sie den Kontakt des Schirms zu Gefahrenquellen wie Sträuchern, Hecken, Zäunen, Zigarettenglut etc., da die Schirmbespannung dadurch beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie jeglichen Scheuerkontakt, auch an Halterungsschraube, Griff der Höhenverstellung, Rollatorrahmen und Rädern. Für silberbeschichtete Schirme ist die Schirmhülle enorm wichtig, da die silberne Beschichtung empfindlich auf mechanische Einwirkung wie Scheuern, Schleifen etc. reagiert.

Dieser Artikel darf in defektem Zustand nicht mehr eingesetzt werden. Der Austausch defekter Teile darf nur mit Original-Ersatzteilen durch einen Fachmann vorgenommen werden.

Diese Anleitung ist Bestandteil jedes Rollator-/Rollstuhlschirms und muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Eventuelle Rücksendungen oder Reklamationen können nur in Verbindung mit dieser Anleitung und dem Kaufbeleg erfolgen. Änderungen in der laufenden Serie vorbehalten.